

Smaltimento dei rifiuti in viaggio

Quando viaggia lo smaltimento dei rifiuti è una Sua responsabilità

- I residui di soluzione nelle sacche, di effluente nelle sacche di scarico e nelle linee devono essere scaricati, e quindi smaltiti in conformità alle leggi locali.
- Ciò in genere significa che questi prodotti vengono eliminati con i normali rifiuti
- Alcune aree sono in grado di riciclare i prodotti; si consiglia di controllare i siti web di riciclo della Sua destinazione



Alla fine del viaggio potrebbero essere avanzati dei prodotti; può riportarli a casa con sé oppure smaltirli.

Baxter non può accettare la restituzione di dispositivi non utilizzati

- I dispositivi monouso inutilizzati come i set per APD, i tappi, ecc. devono essere smaltiti in conformità con le normative locali, che di solito significa che vengono smaltiti con i normali rifiuti
- Le sacche di soluzione non utilizzate devono essere prima svuotate e poi smaltite in conformità alle leggi locali
- Per svuotarle, rimuova la protezione della sacca di soluzione, stacchi il connettore e posizioni la sacca nel lavandino, nella vasca da bagno o nella doccia per farla svuotare
 - In alternativa, può tagliare la sacca e scaricare la soluzione

Baxter non ritirerà i prodotti inutilizzati. È Sua responsabilità smaltire qualsiasi prodotto utilizzato o non utilizzato durante il viaggio.